

MANUEL D'UTILISATION



MEMETHOL®

Manuel d'Utilisation de Pulvérisateur à Barrière

Note : Lisez ce manuel d'utilisation attentivement avant d'utilisation de ce produit.

Objectif d'Utilisation

MEMETHOL Pulvérisateur à Barrière est désigné à diminuer les plaintes des patients d'hémorroïde et de fissure anale et pour les éliminer.

Qui peut l'Utiliser ?

Les adultes qui ont le problème d'hémorroïde et de fissure anale, peuvent utiliser le produit. Les enceintes et les mères allaitantes, les enfants sous 15 ans ne peuvent pas l'utiliser.

Les Indications

- MEMETHOL élimine la douleur et la démangeaison qui sont les symptômes plus importants d'hémorroïde en suivant une voie non-pharmaceutique. Il n'est pas un médicament.
- MEMETHOL protège la zone anale irritabile contre les facteurs microbiens en formant une barrière mécanique sur la couche extrinsèque de l'épiderme.
- Grâce à la formation de couche à filime, il est assuré que le produit reste sur l'épiderme.
- Pendant le traitement, il est espéré que les buses d'hémorroïde rétrécissent et restent dans les tailles non-observables avec les yeux de jour en jour.
- PH du produit est compatible avec la zone anale.
- Avec l'utilisation de MEMETHOL, les problèmes de douleur, de démangeaison, d'enflure et d'hygiène des patients de la fissure anale et d'hémorroïde sont éliminés et il est assuré qu'ils retournent à la qualité journalière de vie.

Les Contre-indications

- Il doit être utilisé seulement par les patients qui sont diagnostiqués à avoir la maladie d'hémorroïde, les patients qui ont les maladies de prolapse rectale, de varicosité anorectale etc. ne doivent pas l'utiliser.
- Il doit être seulement utilisé pour les douleurs provenant d'hémorroïde, la récupération ne peut pas être observée pour les douleurs des patients qui ont l'absidie anorectale.
- Les enceintes, les mères allaitantes et les enfants qui ont sous 15, ne peuvent pas l'utiliser.
- Il ne doit pas être utilisé par les personnes qui sont allergiques à l'un des matériels dans le contenu du produit.

Type d'Utilisation

- 1) Avant utiliser le produit, assurez que la zone d'hémorroïde soit propre et sec.
 - 2) Prenez le produit de sa boîte, secouez la bouteille.
 - 3) Pour appliquer le produit, prenez la position propre exactement pour la zone d'hémorroïde.
 - 4) Tournez le bec sur la fin de bouteille à la hausse et vaporisez au moins 7-8 fois sur exactement au milieu d'hémorroïde. Evitez de contacter à zones génitales.
 - 5) Il est recommandé que vous attendez dans la position d'asseyant pour 1-2 minutes pour assurer que le produit ne coule pas après le procès de pulvérisation.
 - 6) Vous pouvez mettre vos vêtements après attendre 1-2 minutes.
 - 7) Dans le cas où vous mettez vos vêtements tout de suite, les vêtements peuvent être peint de couleur bleu ; faites attention que le produit ne peigne pas les vêtements en bleu.
 - 8) Si le produit répande à vos mains, lavez vos mains ou les autres places répandues avec la mousse et l'eau abondante.
 - 9) Il est important que le produit doive être appliqué une fois par jour sans interruption comme il est expliqué jusqu'à ce que la bouteille finisse.
- Fréquence d'Application**
- Utilisez le produit seulement une fois par jour.
 - Dans le cas où vos plaintes disparaissent avant

que la bouteille finisse, continuez à utiliser une fois par jour jusqu'à ce que la bouteille finisse pour le traitement de la zone.

- Si la récupération n'est pas obtenue ou complétée à la fin de la première bouteille, commencez à utiliser la deuxième bouteille sans interruption. (Il est recommandé que vous utilisiez deux bouteilles pour les événements majeurs.)

Cautions d'Utilisation

- La bouteille doit être SECOUÉE avant chaque utilisation.
- La bouteille doit être utilisée comme il est expliqué et dans les quantités expliquées SANS INTERRUPTION jusqu'à ce qu'elle finisse.

Cautions de Sécurité

- MEMETHOL Pulvérisateur à Barrière;
- Doit être gardé au loin d'accès des enfants.
- Ne doit pas être bu.
- Ne doit pas être contacté avec votre bouche, votre nez ou l'autre organe hors de la zone d'hémorroïde.
- Si le produit contacte avec vos mains, vos yeux, votre bouche etc., lavez la place contactée avec l'eau abondante.
- Ne doit pas touché à vos biens ou vos vêtements.

Les Pas qui peuvent être utilisés faussement et Ses Résultats

- Dans le cas où le produit contacte avec la bouche, le nez ou les yeux, le sentiment d'irritation peut être senti sur le point de contact.
- Dans le cas où le produit est utilisé non-conformément au type d'utilisation ou la quantité de pulvérisation recommandés, le sentiment de démangeaison, d'irritation peut être senti.
- Le produit doit être gardé à la température ambiante.

NE METTEZ PAS AU REFRIGERATEUR, LE PRODUIT PEUT SE GATER.

Les Points à Faire Attention à l'Utilisation

Première

Le manuel d'utilisation doit être attentivement lu avant d'utilisation.
Prenez les cautions en considération avant et pendant d'application.

Arrêtez à utiliser le produit si une situation allergique apparaît après la première utilisation.

Conditions de Garder

- Gardez au loin d'accès des enfants.
- Il ne doit pas être soumis à la lumière directe ou la chaleur.
- La température de garder recommandée est 25 degrés.

- Gardez dans sa boîte et dans une ambiance fraise. Ne gardez pas dans le réfrigérateur.

Les Points à Suivre Pour un Traitement

Permanent

- Ne mangez pas des nourritures épicées et acharnées.
- Ne buvez pas des boissons d'alcool.
- Ne forcez pas la zone quand vous vous soulagez, ne poussez pas.
- Consomez de l'eau abondante pour se soulager.
- Gardez loin des nourritures qui sont connues à causer la constipation.
- Il est recommandé si vous mangez un kiwi chaque jour, il facilitera à se soulager.
- Préférez à manger le pain complet au graines au lieu du pain normal.

Effets Indésirables

Il n'y a pas un effet indésirable connu pour ce produit. MEMETHOL Pulvérisateur à Barrière ne contient pas des produits dérivés de cortisone et d'hormone et de parabène. Il est déterminé que le produit soit doux pour la peau avec les analyses. Ce manuel d'utilisation est préparé conformément à EN ISO 62366 :2008 et a devenu valide en 01.07.2016.

INSTRUCTIONS POUR L'UTILISATION

Instructions Pour L'Utilisation de Pulvérisateur à Barrière

Note : Lisez ce manuel d'utilisation attentivement avant d'utilisation du produit s'il vous plaît.