

Hinweis: Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.

Anwendungsbereich

Das MemeThol Barriere Spray wurde für die Minderung und Beseitigung der Beschwerden von Analfissur- und Hämorrhoiden-Patienten entwickelt.

Geeignete Personen für die Anwendung

Das Produkt kann von erwachsenen Personen mit Analfissur- und Hämorrhoidenbeschwerden angewendet werden. Nicht geeignet für den Gebrauch von schwangeren und stillenden Frauen oder Kindern unter 15 Jahren.

Indikationen

- MEMETHOL beseitigt die wichtigsten Symptome von Hämorrhoiden, Schmerzen und Juckreiz, auf eine nicht-pharmakologische Weise. Dies ist kein Arzneimittel.
- MEMETHOL schafft eine mechanische Barriere auf der obersten Schicht der Haut um den irritierten Analbereich vor bakteriellen Faktoren zu schützen.
- Mit Hilfe der Filmbildung, bleibt das Produkt auf der Epidermis.
- Während der Behandlung ist eine Rückbildung der Hämorrhoidendüsen auf ein nicht erkennbares Niveau zu erwarten.
- Der pH-Wert des Produktes ist kompatibel mit dem des Analbereiches.
- Die Anwendung von MEMETHOL behebt Schmerzen, Juckreiz, Schwellungen und Hygieneprobleme die durch Analwunden (Fissuren) und Hämorrhoiden ausgelöst werden und hilft für die Rückkehr in einen

qualitativ normalen Alltag.

Kontraindikationen

- Dieses Produkt darf nur bei Beschwerden die als Hämorrhoiden diagnostiziert wurden angewendet werden. Vor einer Anwendung bei Patienten/-innen mit Rektumprolaps und anorektalen Krampfadern wird abgeraten.
- Nur bei Schmerzen die durch Hämorrhoiden ausgelöst werden anwenden. Bei Patienten/-innen mit anorektalen Krampfadern kann keine Minderung der Beschwerden erwartet werden.
- Nicht geeignet für den Gebrauch von schwangeren und stillenden Frauen oder Kindern unter 15 Jahren.
- Das Produkt darf nicht von Personen mit Allergien gegen jeglichen Inhalt des Produktes genutzt werden.

Anwendung

- 1) Stellen Sie sicher, dass der Bereich mit Hämorrhoiden sauber und trocken ist, bevor Sie das Produkt anwenden.
 - 2) Entfernen Sie das Produkt aus der Box und schütteln Sie die Flasche.
 - 3) Positionieren Sie sich so, dass Sie das Produkt im Hämorrhoidenareal aufsprühen können.
 - 4) Drehen Sie das Röhrchen am Flaschenhals nach oben und mindestens 6-7 mal genau auf die Hämorrhoiden sprühen. Vermeiden Sie Kontakt mit dem Genitalbereich.
 - 5) Nach dem Sprühvorgang wird geraten 1-2 Minuten in sitzender Position zu warten um das Abfließen des Produktes zu vermeiden.
 - 6) Nach einer Wartezeit von 1-2 Minuten, können Sie Ihre Kleidungen wieder anziehen.
 - 7) Wenn Sie Ihre Kleidung sofort anziehen sollten, könnte sie sich blau verfärben; achten Sie darauf, dass das Produkt keine Verfärbung auslöst.
 - 8) Im Falle von Kontamination mit den Händen, waschen Sie Ihre Hände mit viel Wasser und Seife.
 - 9) Es ist wichtig das Produkt einmal pro Tag und ununterbrochen bis die Flasche verbraucht ist anzuwenden.
- Häufigkeit der Anwendung**
- Verwenden Sie das Produkt nur einmal am Tag.
 - Sollten die Beschwerden noch vor dem kompletten

Verbrauch der Produktflasche verschwinden, setzen Sie die Behandlung bis zum Ende der Flasche einmal pro Tag fort.

- Sollten sich die Beschwerden nach Verbrauch der ersten Flasche nicht bessern, führen Sie die Behandlung mit einer zweiten Flasche fort. (Es wird empfohlen bei schweren Fällen direkt gleich zwei Flaschen zu benutzen; insbesondere die Stufen 3 und 4)

Vorsichtsmaßnahmen bei der Handhabung

- Die Flasche muss vor jedem Gebrauch geschüttelt werden.
- Das Produkt muss jeden Tag, in der beschriebenen Weise und Menge ununterbrochen angewendet werden.

Sicherheits-hinweise

Das MemeThol Barriere Spray muss so gelagert werden,

- dass es nicht in die Hände von Kindern gelangt.
 - Das Produkt bitte nicht trinken.
 - Bitte Kontakt mit dem Mund, der Nase oder anderem Areal außerhalb des Hämorrhoidenareals vermeiden.
 - Im Falle von Kontakt mit den Augen, Mund etc. das kontaminierte Areal unverzüglich mit viel Wasser spülen.
 - Den Kontakt mit Gegenständen und Kleidern vermeiden.
- Falscher Gebrauch und deren Ergebnisse**
- Bei Kontamination mit Mund, Nase oder den Augen kann ein brennendes Gefühl entstehen. In solch einem Falle, das betreffende Areal bitte unverzüglich mit viel Wasser spülen.
 - Im Falle von nicht Einhaltung dieser Gebrauchsanweisungen oder exzessivem Gebrauch können auf der Haut Juckreiz, Reizungen oder Irritationen entstehen.
 - Bitte lagern Sie das Produkt bei Raumtemperatur.
- NICHT IM KÜHL-SCHRANK LAGERN, DAS PRODUKT KANN VERDERBEN.**
- Folgendes sollte bei dem ersten Gebrauch eingehalten werden:**
- Vor dem ersten Gebrauch bitte die Gebrauchsanweisung durchlesen. Bitte beachten

Sie die Warnungen vor und während der Anwendung. Sollte nach der ersten Verwendung des Produktes eine Allergie entstehen stellen Sie bitte die Nutzung des Produktes ein.

Lagerbedingungen

- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
 - Bitte nicht direktem Licht oder direkter Hitze aussetzen.
 - Die empfohlene Lagertemperatur liegt 25 °C
 - Bitte, in der Originalverpackung und bei kühler Temperatur aufbewahren
- Bitte nicht im Kühlschrank aufbewahren.**
- Folgendes sollte eingehalten werden um eine langfristige Behandlung zu garantieren**

- Keine scharfen und würzigen Speisen essen.
 - Kein Alkohol konsumieren.
 - Den Problembereich auf der Toilette nicht strapazieren.
 - Trinken Sie viel Wasser um bequem auf die Toilette gehen zu können.
 - Meiden Sie Lebensmittel die Verstopfung verursachen könnten.
 - Es wird geraten jeden Tag 1 Kiwi zu konsumieren um bequem auf die Toilette gehen zu können.
 - Bitte Vollkornbrot anstatt reguläres Brot bevorzugen.
- Nebenwirkungen**
- Das Produkt hat keine bekannten Nebenwirkungen. Das MemeThol Barriere Spray ist frei von Kortison und ähnlichen Hormonderivaten und Parabenderivaten. Hautfreundlichkeit durch Analysen bestätigt.
- Diese Gebrauchsanweisung wurde gemäß EN ISO 62366:2008 erstellt und ist ab dem 01.07.2016 gültig.