

**Nota :** Lea este manual cuidadosamente antes de usar el producto.

#### Objetivo de Uso

MEMETHOL Pulverizador de Barrera está diseñado para reducir y eliminar las quejas de los pacientes de hemorroides y de fisura anal.

#### ¿Quién puede usar?

Los adultos que tienen el problema de hemorroides y de fisura anal pueden utilizar el producto. Las mujeres embarazadas y lactantes y los niños menores de 15 años no pueden utilizarlo.

#### Indicaciones

- MEMETHOL elimina el dolor y el picor – que son los síntomas más importantes de hemorroides – por un método no farmacéutico. No es un medicamento.

- MEMETHOL protege la zona anal irritada contra los factores microbianos mediante la formación de una barrera mecánica en la capa extrínseca de la epidermis.

- Se asegura que el producto permanece en la piel mediante la formación de un capa de filme.
- Durante el tratamiento, se espera que las hemorroides se reduzcan y se conviertan cada día más pequeñas – tan pequeñas que no se pueden ver por los ojos –.

- El pH del producto es compatible con la área anal.
- Mediante el uso de MEMETHOL, se solucionan los problemas de dolor, picor, hinchazón, y higiene de los pacientes de fisura anal (fissura) y hemorroides

y se asegura que vuelvan a la calidad de vida diaria.

#### Contraindicaciones

- Se debe utilizar sólo para los pacientes diagnosticados de padecer hemorroides; no se debe utilizar por los pacientes de prolapso rectal, varices anorrectal etc.

- Se debe utilizar sólo para los dolores de hemorroides; Posiblemente, el dolor de los pacientes de absceso anorrectal no pasará.
- Las mujeres embarazadas y lactantes y los niños menores de 15 años no pueden utilizarlo.

- No debe ser utilizado por personas quiénes son alérgicas a cualquiera de los materiales incluidos en el producto.

#### Forma de Uso

1) Antes de utilizar el producto, asegúrese de que el área de hemorroides está limpia y seca.

2) Sacar el producto de su caja, agitar el frasco.

3) Para aplicar el producto, se debe posicionar en una posición adecuada para rociar exactamente en la área de hemorroides.

4) Girar la boquilla hacia el extremo de la botella y rociar al menos 7-8 veces exactamente en la área de hemorroides. Evitar el contacto con las zonas genitales.

5) Se recomienda esperar durante 1-2 minutos en la posición de sentado para asegurar que el producto no fluye después del proceso de pulverización.

6) Se puede poner la ropa después de esperar 1-2 minutos.

7) Si se pone la ropa de inmediato, la ropa pueden estar pintadas en color azul; se debe tener cuidado de que la ropa no se pinta en el color azul.

8) Si las manos o otras partes entran en contacto con el producto, se deben lavarse con jabón y agua abundante.

9) Es importante a aplicar el producto por el modo explicado una vez por día sin interrupción hasta que se acabe el contenido de la botella.

#### Frecuencia de Aplicación

- Use el producto sólo una vez por día.

- Si las quejas se desaparecen antes de acabarse el contenido de la botella; se debe seguir utilizando el producto una vez por día para tratar la área hasta que se acabe el contenido de la botella.

- Si no se observa o no se completa la recuperación cuando el contenido de la primera botella se acabe, se debe comenzar a utilizar la segunda botella sin interrupción. (Se recomienda el uso de dos botellas para tratar los casos graves.)

#### Advertencias de Uso

- Se debe AGITAR la botella antes del uso.
- Se debe utilizar como se describe y en cantidades se explica sin interrupciones hasta que termina.

#### Advertencias de Seguridad

MEMETHOL Pulverizador de Barrera;

- Se debe mantener alejado de alcance de los niños.
- No se debe beber.

- No se debe entrar en contacto con la boca, la nariz o un otro parte del cuerpo a excepción de la zona de hemorroides.

- Si el producto entra en contacto con las manos, los ojos, la boca, etc., se debe lavar con agua abundante.

- No se debe entrar en contacto con sus cosas o ropas.

#### Posibles Pasos Erróneos y Sus Consecuencias

- Si el producto entra en contacto con la boca, la nariz o los ojos, se puede sentir la sensación de irritación en el punto de contacto.

- Si el producto no se utiliza de acuerdo con el tipo de utilización o la cantidad de pulverización recomendada, se puede sentir la sensación de picazón, irritación en la piel.

- El producto se debe almacenar a temperatura de ambiente.

#### NO PONGA EN LA NEVERA, EL PRODUCTO PUEDE DETERIORAR.

#### Aspectos a Tener en Cuenta en el Primer Uso

El manual debe ser leído cuidadosamente antes del

primer uso.

Se debe tener en cuenta a las advertencias antes y durante la aplicación.

Se debe dejar el uso del producto si una condición alérgica aparece después del primer uso.

Condiciones de Almacenamiento

- Mantener alejado del alcance de los niños.
- No debe someterse a la luz solar o el calor directo.
- Temperatura de almacenamiento recomendado: 25 °C.

- Mantenga en su envase y en un ambiente fresco.
- No Almacenar en el Refrigerador.

#### Puntos a Cumplir para un Tratamiento Definitivo

- No coma los alimentos picantes y amargas.
- No beba las bebidas alcohólicas.
- Cuando defeca, no fuerce la zona de hemorroides y no empuje.

- Se debe consumir mucha agua para urinar o defecar fácilmente.

- Manténgase alejado del consumo de los alimentos que se sabe causan el estreñimiento.

- Se recomienda a comer un kiwi por día para urinar o defecar fácilmente.

- Se debe comer pan integral con semillas en vez de comer pan normal.

#### Efectos Adversos

El producto no tiene efectos adversos conocidos. MEMETHOL Pulverizador de Barrera no contiene los derivados hormona tales como cortisona, tampoco contiene los derivados de parabenos. Como resultado de los análisis, se ha determinado que el producto es amigable con la piel.

Este manual de uso ha sido elaborado de acuerdo con la norma de EN ISO 62366: 2008 y entró en vigencia en la fecha del 07/01/2016.

#### INSTRUCCIONES DE USO

#### Manual de Uso del Pulverizador de Barrera

**Nota :** Lea este manual cuidadosamente antes de usar el producto.